



СТОЛ МАССАЖНЫЙ СКЛАДНОЙ ВМ-1310




Меры предосторожности

Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию в доступном месте.

1. Регулярно проверяйте стол на наличие неисправностей и повреждений. Убедитесь, что все основные крепёжные узлы изделия надежно зафиксированы, на тросах отсутствуют повреждения и потертости а на металлических частях конструкции – трещины.
2. Во избежание травм, не рекомендуется превышать максимально допустимую нагрузку. Максимально допустимая нагрузка для данной модели составляет 120 кг.
3. Для ухода за столом не рекомендуется использовать чистящие средства, содержащие спирт, поскольку это может привести к повреждению винилового покрытия. Рекомендуется использовать мыльный раствор и насухо протирать стол мягкой тряпкой.
4. Ножки стола должны быть отрегулированы и установлены на одном уровне. В противном случае устойчивость стола будет нарушена, что может привести к травме.
5. Дети не должны допускаться к сборке/разборке стола без присмотра взрослых.
6. Во избежание повреждения поверхности стола, не допускайте контакта поверхности с острыми предметами (нож, ключи, гвозди и т.д.)

Список деталей

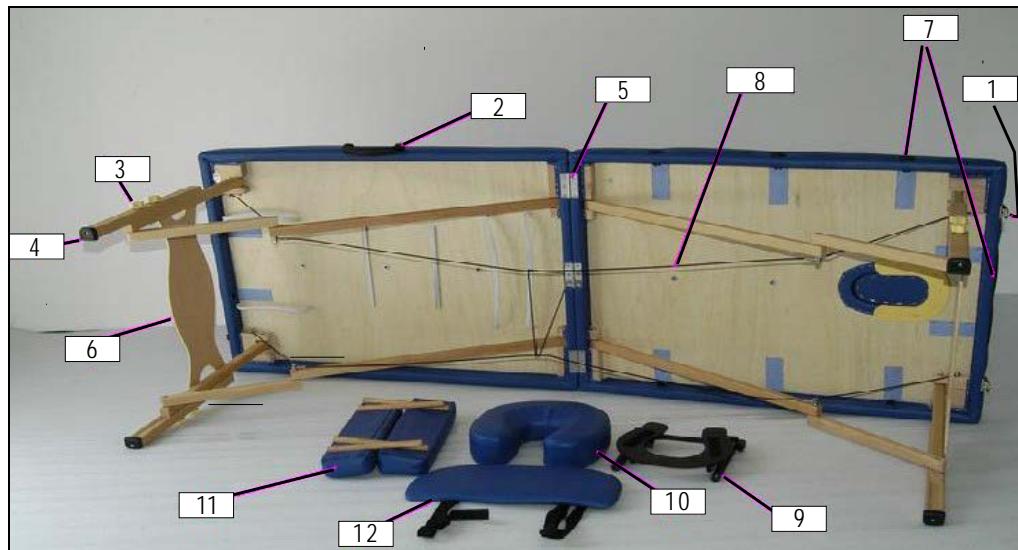

Чехол для переноски

1. Замки	2. Ручка для переноски	3. Регулятор	4. Резиновая заглушка
5. Шарниры	6. Торцевая пластина	7. Выходные отверстия	8. Трос
9. Опора подголовника	10. Подголовник	11. Боковые подлокотники	12. Подвесной подлокотник

Инструкция по сборке



1. Расстегните замки.
2. Положите стол на бок. Откройте стол и вытягивайте 4 ножки до упора.
3. Поставьте стол на ножки.
4. Закрепите подлокотники и подголовник в соответствующих выходных отверстиях. Подвесной подлокотник разместите на опоре подголовника.
5. Отрегулируйте положение подголовника.

Стол готов к использованию.

Внимание!

Вы можете регулировать высоту стола, переставляя регулятор на ножках в нужное отверстие. Следите, чтобы все ножки были отрегулированы на одинаковую высоту.



Чтобы разобрать стол:

1. Снимите все подлокотники и подголовник.
2. Положите стол на бок. Сложите ножки. Закройте стол и защелкните замки.
3. Теперь вы можете переносить стол за ручку, как чемодан.

Внимание! Не используйте стол, если вы обнаружили повреждения на конструкции или ножках стола. Использование поврежденного стола может привести к травме. Использование стола возможно только после устранения всех повреждений и дефектов.

